

Sshh..
Sshh..

tengo un secreto..

ideal Leone
© LIGHT LINGUAL SYSTEM

El sistema lingual **Ideal** **Leone** ha sido expresamente creado para tratar pacientes con malposiciones leves o recidivas, que desean mejorar su sonrisa con un tratamiento invisible, predecible y rápido.



- Los brackets del sistema lingual **Idea-L** tienen dimensiones mesio-distales mínimas y un espesor de sólo 1,4 mm para asegurar el confort y no alterar la fonación del paciente desde el primer día de tratamiento.

El diseño especial de estos brackets simplifica el posicionamiento de la ligadura **Slide**[™] y garantiza el mantenimiento de la posición durante la terapia.



- El uso de la ligadura **Slide**[™] presenta múltiples ventajas:
 - **Slide**[™] se integra en el perfil del bracket haciéndolo libre de asperezas
 - **Slide**[™] aprovecha las ventajas de la biomecánica Low Friction aplicando fuerzas ligeras
 - **Slide**[™] reduce los tiempos terapéuticos.



- En la mayoría de los casos el uso de un alambre redondo **Memoria**[®] .012" es suficiente para obtener la solución del apiñamiento y la mejora estética de la sonrisa. En presencia de rotaciones dentales y/o malposiciones más marcadas se pueden utilizar tanto alambres de dimensiones mayores, **Memoria**[®] o Beta **Memoria**[®], como ligaduras convencionales de fricción para aumentar el control biomecánico.



- El sistema **Idea-L**, estudiado para una biomecánica 2D con el uso de sólo alambres redondos, no requiere difíciles y costosas elaboraciones de modelos.

- Para obtener perfectos alineamiento y nivelación de los dientes anteriores es necesario un posicionamiento cuidadoso de los brackets; es aconsejable por lo tanto una técnica indirecta tanto con cubetas de transferencia realizadas en laboratorio como con los "Jig" expresamente ideados.



- La serie de altímetros de plástico es realizada en seis medidas para permitir la elección de la posición más correcta, en virtud de la anatomía de la superficie lingual del diente.



- Unión del altímetro al bracket que tiene la ligadura **Slide** aplicada en la aleta gingival
- Comprobación sobre el modelo de la medida del altímetro elegido
- Posicionamiento en boca y polimerización del adhesivo
- Remoción del altímetro con un movimiento de rotación
- **Bracket sin "Jig" con la ligadura Slide aplicada en la aleta gingival**
- Bracket con el alambre introducido y la ligadura **Slide** posicionada

*patentado

..llevo
un aparato
ortodóntico..

¿lo dirías?

ideal Leone
O LIGHT LINGUAL SYSTEM

Inicio del tratamiento



Resultado clínico a los 3 meses



- Cosmética ortodóntica de la sonrisa rápida e invisible para la cura de malas posiciones leves y recidivas
- Biomecánica Low Friction 2D para alinear y nivelar los dientes anteriores en pocas semanas
- Brackets de reducidas dimensiones y espesor, utilizados con ligaduras *Slide*TM, aseguran el máximo confort para el paciente
- Posicionamiento práctico y preciso con el especial sistema de transferencia
- Eficaz alternativa a los aligners transparentes
- Máximo respeto por la fonación
- Mínima colaboración del paciente

Inicio del tratamiento



Resultado clínico a los 3 meses



SISTEMA IDEA-L					
1.6	1.4	torque	angul.	.018"	
			0°	$\frac{1}{1}$ 1	F4980-04
			0°	$\frac{2}{2}$ 2	F4980-04
			0°	$\frac{3}{3}$ 3	F4980-04
			0°	$\frac{4}{4}$ 4	F4984-04
			0°	$\frac{1}{1}$ 1	F4980-04
			0°	$\frac{2}{2}$ 2	F4980-04
			0°	$\frac{3}{3}$ 3	F4980-04
			0°	$\frac{4}{4}$ 4	F4984-04

Brackets C.D. linguales IDEA-L

Confecciones de 5 piezas



F4980-91 Kit brackets linguales IDEA-L

El kit contiene:
8 brackets (una arcada) y
12 ligaduras *Slide*TM extra-small,
color plata



ALTÍMETROS PARA BRACKETS LINGUALES		
medida	código	
1	F4900-01	conf. 20
2	F4900-02	
3	F4900-03	
4	F4900-04	
5	F4900-05	
6	F4900-06	



F4900-60 Kit altímetros para brackets linguales IDEA-L


Confección surtida de 120 piezas



K6264-10 Ligaduras *Slide*TM extra-small - color plata

Confección de 10 módulos de 6 ligaduras cada uno

ARCOS LINGUALES MEMORIA®				conf. 2
Ø inch	pequeños	medianos	grandes	
.012	C4950-12	C4951-12	C4952-12	
.014	C4950-14	C4951-14	C4952-14	
ARCOS LINGUALES BETA MEMORIA®				
.016	C4970-16	C4971-16	C4972-16	

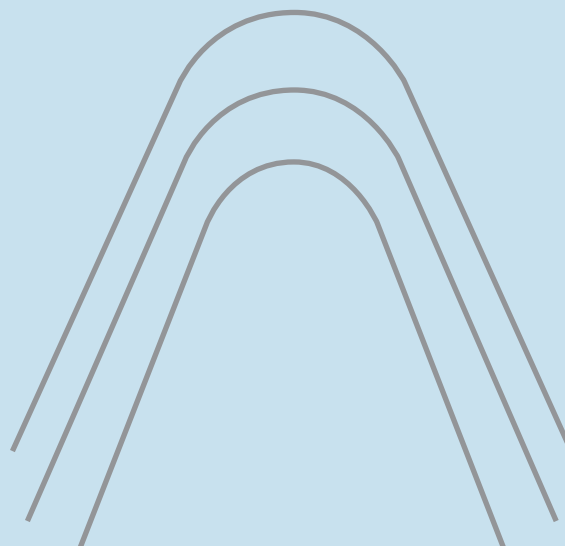

ideal
O LIGHT LINGUAL SYSTEM

LEONE S.p.a Ortodoncia e Implantología

Via P. a Quaracchi, 50 - 50019 Sesto Fiorentino - FIRENZE (Italia)
Tel. +39.0553044620 Fax +39.055304405 info@leone.it www.leone.it